

KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN MARKASI : **NOPA INSTRUMENTS**

Bu ürün Tıbbi Cihazlarla ilgili 93/42/EEC yönetmeliği gereklerine uygun olarak paslanmaz çelikten üretilmiştir.

CERRAHİ EL ALETLERİ İÇİN MODEL TABLOSU

Modeli	Alt Model Adı
Spekülümler	Kulak-Burun-Göz-Vajinal ve Rektal spekülümler,Agız açıcılar
Portegüler	Standart portegüler,Mikro portegüler,Tel portegüler,Sütür enstrumanları
Pensler	Hemostatik-Arter-Diseksiyon-Damar-Tampon-Doku pensleri,Bagırsak pensleri, Kemik pensleri,Ranjor pensler,Alligator pensler,Biopsi pensler,Dis çekim davyeleri
Pensetler	Doku-Diseksiyon-Göz-Mikro-Sütür-Bipolar ve Disçi pensetleri
Makaslar	Cerrahi-Diseksiyon-Damar ve Mikro makasları ,iplik ve Tel makasları,Alçı makasları
Küretler	Kemik-Uterus-Kulak-Göz-Burun ve Dis Küretleri
Kemik Kesikleri/Deliciler	Osteotomlar,Chisellar,Gujlar,Trepanlar,Frezler,Matkaplar
Genel Ortopedik Cerrahi Aletleri	Tornavidalar Traksiyon Aletleri ve Tendon Çıkarıcıları
Elavatörler	Kemik - Dis elavatörleri
Ekartörler	Cilt-Batın-Göğüs ekartörleri,Otomatik ekartörleri,Huklar,Pikler
Dilatörler	Stileler,Sondlar,Uretral-Uterus-Safra Kanalı ve Damar Dilatörleri,Trokarlar
Çekiçler	Metal ve Sentetik çekiçler
Bıçaklar	Cerrahi bıçak sapları,Bistüriler,Cerrahi bıçaklar

KULLANIM AMACI

Cerrahi el aletleri; cerrahi müdahaleler sırasında kesme, delme, dikme, birleştirme, sıkma, çekme, tutturma veya benzeri cerrahi işlemleri yapmak için kullanılır.

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Cerrahi Aletler ilk alındıklarında fabrika tarafından özel bir yağla yağlanmışdır. Bu yüzden aletleri kullanmadan önce ambalajından çıkardıktan sonra, mutlaka yağdan arındıracak şekilde 5.5 ph veya özel temizleyicilerle iyice temizlenmeli ve mutlaka kurulanmalıdır.
2. Tüm aletler, kullanıldıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda kan, doku ve diğer maddelerden temizlenip distile su ile durulanmalıdır. Çamaşır suyu ve bazı kimyasallar zamanla korozyona neden olur.
3. Temizlik işleminden hemen sonra aletler kurulanmalıdır. Herhangi kapalı bir yere konmamalıdır. Bu korozyona sebep olur.
4. Eğer soğuk su sterilizasyon yöntemi kullanılıyorsa, solüsyon düzenli olarak değiştirilmelidir. Aksi takdirde korozyona sebep olur.
5. Spesifik cerrahi alet temizleyicilerinden başka herhangi bir temizlik malzemesi kesinlikle kullanılmamalıdır.
6. Cerrahi aletler, deterjan ve bulaşık teli gibi maddelerle temizlenmeye çalışılmamalıdır. Eğer elle temizlik yapılacaksa özel temizlik maddeleri veya sabun ve yumuşak fırça ile yapılmalıdır. Durulama muhtak distile su ile yapılmalıdır.
7. Paslanmaz çelik cerrahi aletlerinizi krom tepsilerde sterilize etmeyiniz. Çünkü bu tepsinin yüzeyi ile temas eden aletin yüzeyi arasında elektriksel hareket oluşup paslanmayı hızlandırır.
8. Sterilizasyon dan hemen sonra otoklavı açmak için acele etmeyiniz. Bir süre otoklavda soğumaya bırakınız. Ani ısı değişiklikleri aletlerin sertleşip kırılmalarına yol açar.
9. Cerrahi aletler her temizlendiğinde yeni hazırlanmış dezenfeksiyon ve temizlik eriyikleri kullanılmalıdır.
10. Mekanik ve ultrasonik temizlikten sonra aletler iyice durulanmalıdır.
11. Aletler soğuduğunda yağlayıp; temizlik, leke ve işlev (fonksiyon) kontrolü yapılmalıdır.
12. Bu işlemler sırasında kesinlikle tel fırça, metal sünger kullanılmamalıdır.
13. Fonksiyonlarını yitirmiş cerrahi aletler diğerlerinden ayrılmalıdır.
14. Mafsalı aletleri yağ ile yağlayın.
15. Korozyona uğramış aletlerle diğer aletler birlikte otoklava konmamalıdır.
16. Otoklava cerrahi aletler keten veya pamuklu beze sarılı olarak mutlaka alüminyum konteynırlar içinde konulmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI

17. Garanti süresi; teslim tarihinden başlayarak 10 yıl sürer.
18. Cerrahi el aletlerinin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
19. Cerrahi el aletlerinin garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamir de geçen süre, garanti süresine eklenir.
20. Cerrahi el aletlerinin tamirat süresi en fazla 30 iş gündür. Yenisiyle değişim gerektiği durumlarda 60 işgününde değişim yapılır.
21. Cerrahi el aletlerinin garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamirata yapılacaktır.
22. Cerrahi el aletlerinin teslim edildiği tarih itibariyle; belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydı ile 1 yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarı halinde Cerrahi el aletinin firmamız tarafından garanti kapsamında yenilenecektir.
23. Cerrahi el aletlerinin arızalarına yetkili teknik servisimiz dışında müdahale yapılması durumunda garanti kapsamından çıkartılır.
24. Cerrahi aletler, kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalarda garanti kapsamı dışı olup, yetkili teknik servis dışındaki müdahale edilmesi durumunda tamamıyla garanti kapsamından çıkar.

TAŞIMA VE DEPOLAMA

25. Nakliye yada taşıma esnasında 3 ten fazla aletin üst üste taşınmaması gereklidir. Taşıma esnasında mutlaka her alet ayrı paketlenmeli, çizilmemesine ve darbe almamasına azami dikkat gösterilmelidir.

UYARILAR ÖNERİLER:

26. Dikkat: Keskin uçlu yada kesici aletlerde ciddi yaralanma riski vardır.
27. Aletler sadece uzman kişilerce kullanılmalıdır, aksi takdirde insan sağlığı için ciddi tehdit oluşturabilir.
28. Vücut içinde uzun süre kalmaları durumunda ciddi zehirlenme, zedelenmeler ve kesiklere hatta ölümlere yol açabilir.

KULLANIM ÖMRÜ

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü, 10 yıldır.

İTHALATÇI FİRMA:

ÜNVANI : ATLANTİS MEDİKAL DIŞ TİC.İNŞ.TUR.OTO.LTD.ŞTİ.
ADRESİ : Öveçler 4. Cad. No: 121/5 ÇANKAYA-ANKARA
TEL : (312) 475 68 86 (pbx)
FAKS : (312) 475 76 35
E-MAIL : info@atlantismedikal.com www.atlantismedikal.com

İMALATÇI FİRMA:

ÜNVANI : NÖPA INSTRUMENTS MEDIZINTECHNIK GmbH
ADRESİ : Weilatten 7-9 78532 TUTTLINGEN- ALMANYA
TEL : +49 7462 94900
FAKS : +49 7462 949090

YETKİLİ TEKNİK SERVİS:

ÜNVANI : ATLANTİS MEDİKAL DIŞ TİC.İNŞ.TUR.OTO.LTD.ŞTİ.
ADRESİ : Öveçler 4. Cad. No: 121/5 ÇANKAYA-ANKARA
TEL : (312) 475 68 86 (pbx)
FAKS : (312) 475 76 35